


## ВОПРОС 2. Порядок снятия мерок и определения размеров медицинских изделий Avicenum

При определении размера, пожалуйста, уделите должное **внимание снятию мерок**. От правильного определения размера зависит правильное функционирование чулка/нарукавника. Снятие мерок необходимо проводить утром, так как в течение дня конечности отекают.


Измерьте все точки, показанные в таблице размеров для данного изделия. Как изделие должно надеваться на конечность, показано на рисунках. При выборе размеров наиболее важны значения, показанные в таблице на сером фоне.

### Точки измерений – рука

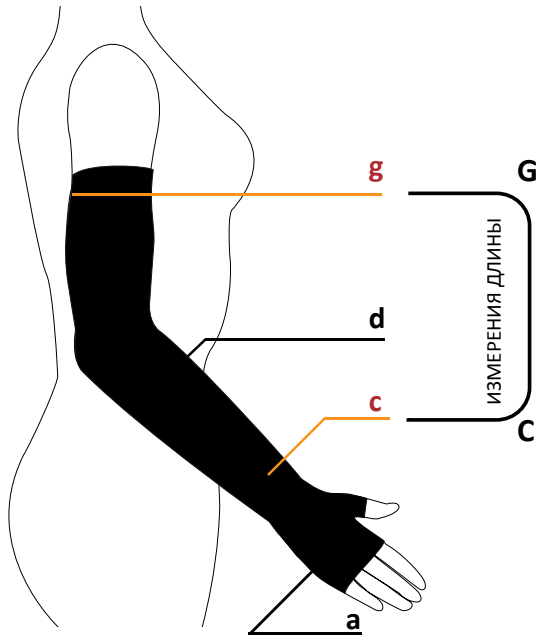

- a**    объем ладони
- c**    объем запястья
- d**    объем предплечья
- g**    объем под плечом
- C – G** измерения длины

### Точки измерений – нога

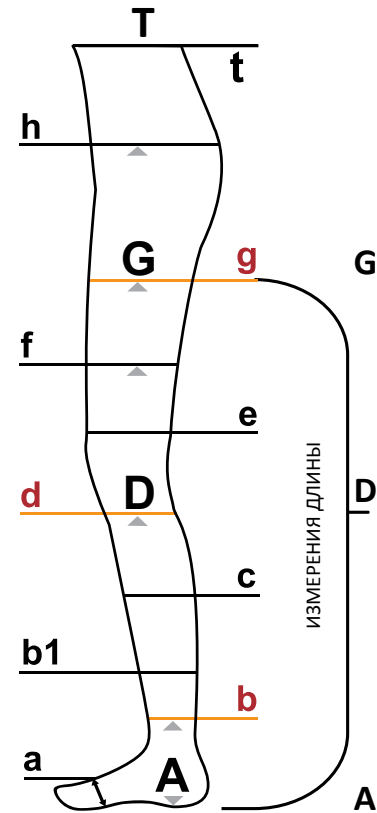

- a**    объем ступни
- b**    объем над щиколоткой
- b1**    объем 10 см над щиколоткой
- c**    объем икры ноги
- d**    объем под коленом
- e**    объем над коленом
- f**    объем бедра (по середине бедра)
- g**    объем бедра (5 см ниже паха)
- h**    объем бедер
- t**    объем талии

#### Измерения длины

- A – D** гольфы
- A – G** бедренный чулок

# Avicenum 140

## 3. Таблица размеров изделий Avicenum

Размер		Объем ноги в точках измерения					
новый	старый	b	d	f	g	h	t
<b>S</b>	1	20 – 24	34 – 37	46 – 50	50 – 55	110	80
<b>M</b>	2	24 – 27	37 – 40	50 – 54	55 – 60	120	90
<b>L</b>	3	27 – 30	40 – 44	54 – 58	60 – 66	130	100

	Длина	
	новый	long
Икроножные А – D	менее 37	более 37
Бедренные А – G Колготки	менее 70	более 70

# Avicenum 360/Avicenum 520

Размер		Объем ноги в точках измерения									
новый	старый	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
<b>S-</b>	1-	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
<b>S</b>	1	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
<b>S+</b>	1+	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
<b>M-</b>	2-	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
<b>M</b>	2	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
<b>M+</b>	2+	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
<b>L-</b>	3-	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
<b>L</b>	3	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
<b>L+</b>	3+	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
<b>XL-</b>	4-	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
<b>XL</b>	4	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
<b>XL+</b>	4+	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
<b>XXL</b>	5	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

Длина			
новый	short	normal	long
старый	UK ультра-коротк	K короткая	D длинная
Икроножные А – D		34 – 38	38 – 43
Бедренные А – G Колготки	56 - 62	62 – 71	71 – 82

# Avicenum ANTI-TROMBO

Размер	Измеряемый объем в точке		
	b	d	g
<b>S</b>	17 – 20	28 – 34	41 – 54
<b>M</b>	20 – 23	31 – 37	48 – 61
<b>L</b>	23 – 26	34 – 40	55 – 68
<b>XL</b>	26 – 29	37 – 43	62 – 75
<b>XXL</b>	29 – 32	40 – 46	69 – 82

# Avicenum 360 ARM SLEEVE (нарукавник)

Размер		Объем руки в точках измерения			
новый	старый	a	c	d	g
<b>S</b>	1	do 18	16 – 19	22 – 26	24 – 30
<b>M</b>	2	do 20	19 – 22	26 – 30	30 – 36
<b>L</b>	3	do 23	22 – 25	30 – 34	36 – 42
<b>XL</b>	4	do 25	25 – 28	34 – 38	42 – 48

Длина		
новый	normal	long
старый	K короткая	D длинная
C – G	менее 45	более 45

# Avicenum 70

Размер АТ	
новый	старый
<b>S</b>	158-164/100
<b>S+</b>	158-164/116-124
<b>M</b>	164-170/108
<b>M+</b>	164-170/116-124
<b>L</b>	170-176/108-116
<b>L+</b>	170-176/116-124
<b>XL</b>	176-182/108-116
<b>XL+</b>	176-182/116-124

Этот материал носит исключительно информационный характер.

## ВОПРОС 4. Цветовая гамма **Avicenum**

### Цветовая гамма Avicenum



0000  
БЕЛЫЙ



5090  
СИНИЙ



7001  
СЕРЕБРИСТО  
-СЕРЫЙ



7006  
СЕРО  
-КОРИЧНЕВЫЙ



7007  
АНТРАЦИТ



8000  
СВЕТЛЫЙ



8001  
НАТУРА



8002  
БРОНЗ



8003  
ПЕСОК



8005  
ТАБАК



8080  
ШОКОЛАД



9999  
ЧЕРНЫЙ